

Inicio del tratamiento

Esta ficha de procedimiento no intenta reemplazar el asesoramiento o la capacitación brindados por su médico o enfermera de DP. Consulte la Guía del usuario de la cicladora Liberty PdX (P/N 480054-01) para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Con éste y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal, siempre mantenga la técnica de esterilización. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida. Siga las instrucciones como aparecen en las pantallas de la cicladora Liberty. Espere sus indicaciones para ir al paso siguiente.


Nota: Todas las ilustraciones son solo a modo de ejemplo.

1




- Asegúrese de que la cicladora esté enchufada en un tomacorriente con descarga a tierra.
- Si usa el sistema IQdrive™, insértelo en el puerto USB que se encuentra en la parte posterior izquierda de la cicladora Liberty PdX si se está frente a la parte delantera de la cicladora.
- Encienda la cicladora Liberty con el interruptor de encendido blanco que se encuentra en la parte posterior.

2

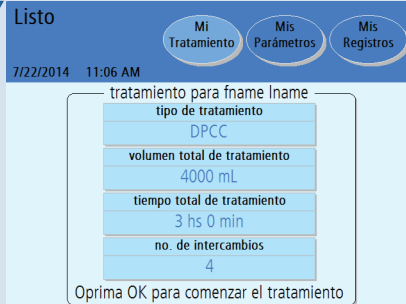

- Para hacer cambios en la terapia, paciente, opciones o elecciones de hardware, presione ahora en **Mis Parámetros**.
- Regrese a la pantalla Listo y asegúrese de que la información de la receta sea correcta.
- Presione OK para comenzar el tratamiento.

3

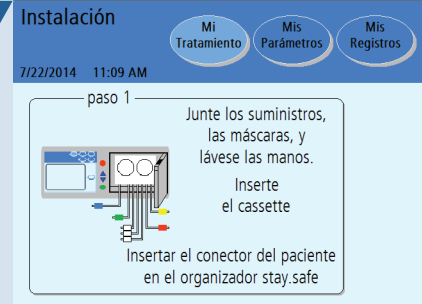


- Reúna los artículos necesarios:
 - Bolsas de solución (verifique la solución, la claridad, la cantidad, las fugas, y la fecha de expiración.)
 - Casete de la cicladora Liberty PdX
 - Organizador stay*safe
 - Tapas de stay*safe
 - Línea(s) o bolsas de drenaje
 - Desinfectante para manos
- Póngase una máscara y lávese las manos.

4




- Antes de realizar la inserción, inspeccione los tubos del cassette y la película para verificar que no haya daños.
- Primero, inserte cuidadosamente la parte superior del cassette, luego presione la parte inferior hasta que encaje y cierre la puerta.
- Las líneas deben colgar hacia abajo.
- Inserte el conector (gatillo) de la línea del paciente (la línea de la pinza azul) en el organizador stay*safe.
- Presione **Sigue**.

5

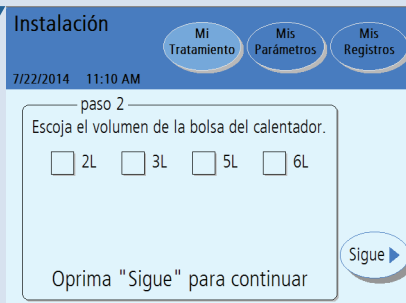

- Cuando se indique:
- Elija el volumen de la bolsa del calentador:
 - 2L, 3L, 5L o 6L.
 - La bolsa que usa para su bolsa del calentador debe tener por lo menos 1000mL más que el primer volumen a infundir y por lo menos tanto como el máximo volumen a infundir.

6

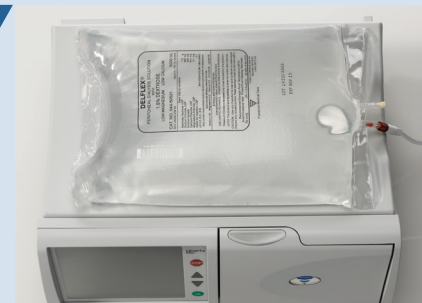

- Cuando se indique:
- Conecte la línea de color **ROJO** a la bolsa del calentador.
 - Conecte la línea de color **VERDE** a la última opción de bolsa o una bolsa de suministro adicional.
 - Conecte las líneas de color **BLANCO** a las bolsas de suministro adicionales.
 - Conecte la línea de color **AMARILLO** a la línea o bolsas de drenaje.
 - Asegúrese de que la bolsa del calentador esté colocada uniformemente en la bandeja del calentador.
 - Presione **Sigue**.

Inicio del tratamiento (continuación)



Cuando se indique:

- Rompa los conos del calentador y las bolsas de la solución con los dedos o con una herramienta stay*safe.
- Doble el cono hacia atrás y hacia adelante hasta que se separe por completo y los conos floten.
- Sujete con pinza las líneas que no se usen.
- Presione **Sigue**.

8 Instalación Mi Tratamiento Mis Parámetros Mis Registros

7/22/2014 11:11 AM

paso 4

Revise las conexiones de las bolsas
Oprima "Atrás" y repeta detección de bolsas.

última Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa
bolsa 3 2 1 del calent.

Oprima "Sigue" para continuar

Atrás

Sigue

- Verificación de detección de las bolsas muestra cuales líneas están conectadas a las bolsas de solución.
- Las bolsas conectadas tienen líneas sin pinza. Las bolsas no conectadas tienen líneas con pinza.
- Verifique que sus bolsas coincidan con las de la pantalla.
- Presione **Sigue**.

9 Preparación Mi Tratamiento Mis Parámetros Mis Registros

7/22/2014 11:11 AM

paso 5

Asegúrese de que la línea azul esté abierta

Oprima "Sigue" para continuar

Sigue

- Verifique que la pinza azul de la línea del paciente esté abierta.
- Presione **Sigue** para cebar la línea del paciente (la línea de la pinza azul).

10 Preparación Finalizado Mi Tratamiento Mis Parámetros Mis Registros

7/22/2014 11:12 AM

paso 6

Cierre la línea del paciente o oprima "Atrás" para preparar líneas nuevamente

Oprima "Sigue" para continuar

Atrás

Sigue

- Una vez finalizado el cebado, inspeccione la línea de la pinza azul para el paciente con el fin de verificar que esté completamente llena de líquido.
- Presione **Atrás** para volver a cebar según sea necesario.
- Cierre la pinza azul de la línea del paciente y presione **Sigue**.



11 Intercambio Diurno Mi Tratamiento Mis Parámetros Mis Registros

7/22/2014 11:13 AM

Entre la información de intercambio diurno manual

Hizo un intercambio manual diurno?

intercambio diurno
SÍ

¿Cuánta infusión hizo usted mismo después de drenar?

vol. de infusión manual
1000 mL

Oprima "Sigue" para continuar

Sigue

- Ingrese **SÍ** si llenó el abdomen con solución sin usar la cicladora Liberty PDX (intercambio manual).
- Ingrese el volumen a infundir de su intercambio manual. Presione **Sigue** para continuar.
- Revise las configuraciones ingresadas y luego presione **Sigue** nuevamente.

12 Listo para Tratamiento Mi Tratamiento Mis Parámetros Mis Registros

7/22/2014 11:14 AM

paso 7

Utilice la técnica aséptica para que usted mismo conecte la línea azul

Abra la grapa de la línea azul y la pinza del catéter

Oprima "Sigue" para continuar

Sigue

- Una vez conectado, abra ambas pinzas, la pinza del catéter y la pinza azul para el paciente.
- Presione **Sigue** para continuar.
- El tratamiento comenzará en este momento.



Indicaciones de uso: La cicladora Liberty PDX de Fresenius Medical Care ha sido diseñado para diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: La legislación federal (estadounidense) establece que este dispositivo solo puede ser vendido por un médico o por orden de un médico.

Fabricado por:
Fresenius USA, Inc.
4040 Nelson Ave
Concord, CA 94520

Para hacer preguntas o consultas, comuníquese a cualquier hora con el servicio técnico al 1-800-227-2572. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo, staysafe, IQdrive y Liberty son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. y/o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. © 2007-2014 Fresenius Medical Care North America. Todos los derechos reservados. P/N 480055-01 Rev A 09/2014